

Zo eenvoudig als 1, 2, 3...

1. Vullen

Til het groene deksel op en voeg de medicatie toe. Sluit het deksel en ga rechtop zitten, klaar om de behandeling te starten.



2. Behandeling

Druk op de startknop en adem in en uit door het mondstuk.***
InnoSpire Go zal het einde van de behandeling aangeven met een visueel en geluidssignaal alvorens automatisch uit te schakelen.




3. Reinigen

Na elke behandeling het mondstuk spoelen met warm water. Aan het einde van iedere dag wassen met water en zeep en één keer per week desinfecteren in kokend water.



Meer informatie:

www.philips.com/respironics

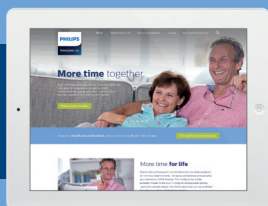

** Met gebruik van 2,5 ml salbutamol.

*** Een volwassen masker is beschikbaar indien u het moeilijk vindt om het mondstuk te gebruiken.



© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Philips Respironics and Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd are Philips companies.

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park
City Fields Way
Tangmere
Chichester
PO20 2FT UK

YL 3/6/17 PN487717
www.philips.com/respironics

PHILIPS

InnoSpire Go

Draagbare mesh vernevelaar



Meer tijd in het dagelijks leven

Meer tijd samen

Snel, effectief en eenvoudig te gebruiken. De InnoSpire Go vernevelaar is ontworpen om COPD-behandeling te verkorten, waardoor u meer tijd hebt voor die dierbare momenten met familie en vrienden.



Vermindert de behandelingstijd met 25%*



Behandeling in 4 minuten**

Een efficiënte vernevelaar voor COPD-behandeling die het einde van de behandeling aangeeft met een visueel en geluidssignaal, alvorens automatisch uit te schakelen.



Geruisloos

Een kleine, draagbare en discrete vernevelaar die overal gebruikt kan worden.



Ingebouwde batterij


met lange levensduur. De oplaadbare batterij biedt tot ruim 30 behandelingen tussen elke laadbeurt.



Eenvoudig - slechts twee onderdelen

Het makkelijk afneembare mondstuk maakt de InnoSpire Go eenvoudig in gebruik, schoonmaak en onderhoud.***

Meer informatie:
www.philips.com/respironics

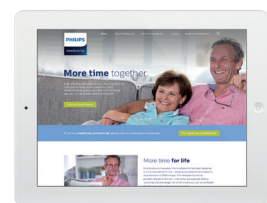

Daadwerkelijke grootte

* Versus voorgaand model, Aeronex Go.

** Met gebruik van 2,5 ml salbutamol.

*** Een volwassen masker is beschikbaar indien u het moeilijk vindt om het mondstuk te gebruiken.