

Nederlands



Gebruikshandleiding

DreamStation met verwarmde slang

PHILIPS
RESPIRONICS

Overzicht van het systeem

van een afzonderlijk uitademingshulpmiddel, raadpleegt u de instructies die meegeleverd zijn met het masker en therapieapparaat.


De DreamStation verwarmde luchtbevochtiger met verwarmde slang zorgt voor bevochtiging, wat extra comfort oplevert tijdens de therapie. Dit bevochtigingsniveau wordt geregeld door de uitvoer van de verwarmde luchtbevochtiger en de temperatuur van de optionele verwarmde slang. Dankzij deze twee accessoires kan een comfortabel vochtigheidsniveau gehandhaafd worden aan het masker.

De DreamStation verwarmde luchtbevochtiger bestaat uit de volgende componenten:

- **Verwarmde slang:** de verwarmde slang is een optioneel accessoire dat samen met de verwarmde bevochtiger wordt gebruikt om de geleverde bevochtiging te regelen. Dit wordt mogelijk gemaakt door controle van de luchttemperatuur, om te verzekeren dat deze niet afkoelt voordat het masker wordt bereikt. Deze handleiding bevat instructies voor het aansluiten en hanteren van de verwarmde slang. Voor instructies over de instelling van de temperatuur van de verwarmde slang raadpleegt u de handleiding bij het therapieapparaat.

Funcities en inhoud van het systeem

Belangrijk: lees en begrijp de volledige handleiding van uw therapieapparaat voordat u probeert *de verwarmde slang te gebruiken*

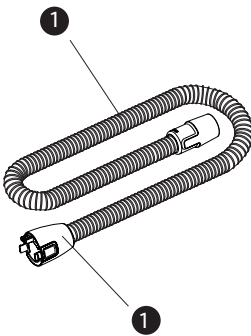

Deze afbeelding toont functies en inhoud van het apparaat, die in de volgende tabel worden beschreven.

nr.	Apparaatfunctie	Beschrijving
1	Flexibele verwarmde slang	De optionele verwarmde slang wordt van de luchtbevochtiger aangesloten op het masker.
2	Luchtbevochtiger-connector	Sluit dit uiteinde van de slang aan op de luchtbevochtiger.

Opmerking: deze verwarmde slang is alleen gespecificeerd voor gebruik met DreamStation therapieapparaten van Philips Respironics.

Contact opnemen met Philips Respironics

Indien u problemen ondervindt met deze apparatuur of hulp nodig hebt bij het opstellen, gebruiken of onderhouden van het apparaat of accessoires, neem dan contact op met uw thuiszorgverlener. Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met Philips Respironics, belt u de afdeling Klantenservice van Philips Respironics op +1-724-387-4000 of +49 8152 93060. U kunt ook de volgende adressen gebruiken:

Respironics, Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, Verenigde Staten


Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Duitsland

Aansluiten op het therapieapparaat


1. Zet het therapieapparaat en de verwarmde luchtbevochtiger (met lege watertank) op een stevig, vlakke ondergrond.

Let op: verplaats de luchtbevochtiger niet terwijl er water in de watertank is.

1. Om de verwarmde slang aan te sluiten op de verwarmde luchtbevochtiger, brengt u de connector (1) aan de bovenzijde van de verwarmde slang op één lijn met de bovenzijde van de luchtuitlaatpoort (2) op de luchtbevochtiger.

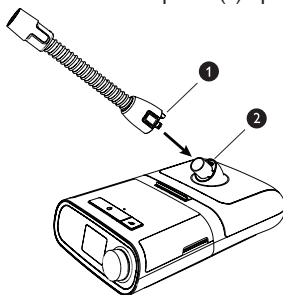

2. Druk de slang op haar plaats over de luchtuitlaatpoort tot de lipjes aan de zijkant vastklikken in de gleuven aan de zijkanten van de uitlaatpoort.

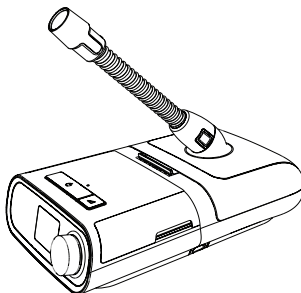


Opmerking: indien u een standaard slang (niet getoond) gebruikt in plaats van een verwarmde slang, schuift u de slang gewoon over de luchtuitlaatpoort op de verwarmde luchtbevochtiger.

Belangrijk: voor elk gebruik onderzoekt u de slang op knikken, schade of vuil. Reinig zo nodig de slang om het vuil te verwijderen. Vervang de slang bij beschadiging.

Slang loskoppelen

Om de verwarmde slang te verwijderen, drukt u de lipjes (1) aan de zijkant van de slangconnector in en trekt u de slang weg van de uitlaatpoort.

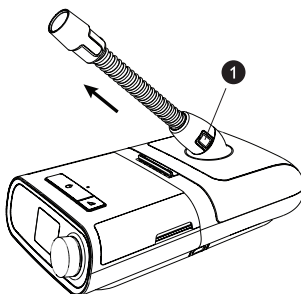

Opmerking: indien u een standaard slang (niet getoond) gebruikt in plaats van een verwarmde slang, trekt u gewoon de slang weg van de uitlaatpoort.

Instructies voor reiniging thuis: Verwarmde slang

Reinig de verwarmde slang voor het eerste gebruik en daarna elke week.

1. Maak de verwarmde slang los van de verwarmde luchtbevochtiger.
2. Was de verwarmde slang, inclusief de connectors, voorzichtig in een oplossing van warm water en een mild afwasmiddel om aangehechte stoffen eruit te verwijderen.
3. Spoel grondig met water om alle zeepresten uit de slang en connectors te verwijderen, en laat drogen aan de lucht. Controleer of de slang en connectors droog zijn voor het volgende gebruik.
4. Controleer de verwarmde slang op beschadiging en slijtage (barsten, [haar]scheuren, lekken enz.). Gooi weg en vervang indien nodig.

Onderhoud

De luchtbevochtiger heeft geen routineonderhoud nodig. Indien een onderdeel van de luchtbevochtiger versleten of beschadigd is, neem dan contact op met Philips Respironics of uw thuiszorgverlener. Raadpleeg het gedeelte 'Problemen oplossen' in deze handleiding voor bijkomende informatie.

Door het menu navigeren (Therapie AAN) en instellingen voor optionele luchtbevochtiging

Terwijl het apparaat therapie geeft, kunt u de instellingen voor de Tube Temperature (Temperatuur van de slang) of Humidifier (Luchtbevochtiger) wijzigen. Draai aan de knop om een van beide instellingen te selecteren. Druk en draai aan de knop om de instelling te wijzigen.

Opmerking: indien u de luchtbevochtiger zonder de verwarmde slang gebruikt, draai dan gewoonweg aan de knop om de instelling Humidifier (Luchtbevochtiger) te wijzigen.



Therapiedruckscherm

Nr.	Functie	Beschrijving
1	Therapiedruk	Geeft weer hoeveel druk er momenteel wordt geleverd.
2	Aanpasbare instelling van slangtemperatuur	Voor deze instelling kunt u gaan van positie 0 tot 5. Verschijnt enkel indien de optionele verwarmde slang is aangesloten.
3	Aanpasbare instelling van luchtbevochtiger	Voor deze instelling kunt u gaan van positie 0 tot 5. Verschijnt enkel wanneer de luchtbevochtiger is aangekoppeld.
4	Mogelijke functies	Afhankelijk van de setup verschijnen hier de therapiefuncties die mogelijk zijn.



Specificaties van verwarmde slang

Maximaal aanbevolen druk

25 cm H₂O

Binnendiameter

15 mm

Lengte

1,83 m

Temperatuurinterval van verwarmde slang

16 tot 30 °C

Temperatuur waarbij verwarmde slang wordt uitgeschakeld

≤ 41 °C

Materiaal

Flexibele plastic en elektrische componenten

Elektrisch (verwarmde slang wordt aangedreven door de verbonden verwarmde luchtbevochtiger)

Raadpleeg het gedeelte 'Elektrisch' van de Specificaties DreamStation verwarmde luchtbevochtiger

Omgeving

Raadpleeg het gedeelte 'Omgeving' van de Specificaties DreamStation verwarmde luchtbevochtiger



1124833

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA



Respironics Deutschland
Gewerbestr. 17
82211 Herrsching, Germany



0123

REF 1124833

1124833 R00
LZ 8/19/2015
FR, DE, NL